

OxyMatrix™ Technology



5% HP KIT/GEL PACK
Incl. 25% Hydrogen Peroxide

MEDIUM

AlfaClar

Інструкція

AlfaClar™

Платформа естетичної стоматології

AlfaClar - американська компанія, що пропонує високоякісні продукти та сучасні технології для професіоналів, від безпечних та ефективних систем відбілювання до рішень у сфері естетичної стоматології та догляду за порожниною рота.

Комплексна система відбілювання зубів AlfaClar включає гель **PreClar Duo™**, гель **Delicate** (на основі 44% пероксиду карбаміду), гелі **Medium** та **Strong** (на основі перекису водню 25% і 38%), лампи **Lumiryx™** та **MagicLight Pro**, набори для домашнього відбілювання.

Бірюзовий відбілюючий гель на основі Перекис Водню 25% розроблений для пацієнтів із нормальною товщиною емалі та середнім рівнем чутливості.

Технологія OxyMatrix™

Матрична технологія відбілювання зубів із контрольованим вивільненням активного кисню. Вона надає можливість адаптації процесу до типу емалі, рівня чутливості та бажаного результату. Технологія поєднує професійні відбілюючі та підготовчі гелі з індивідуальними клінічними протоколами й домашнім відбілюванням.

Контрольоване вивільнення кисню

Відбілюючі гелі досягають повної активності після нанесення, тоді як лампа Lumiryx™ прискорює й допомагає контролювати реакцію. Завдяки оптимізованому рН, буферній та каталітичній системам, кисень вивільняється поступово - без агресивного "імпульс-ефекту".

Розширений протокол

Розпочніть процедуру з гелю PreClar Duo™, щоб підготувати емаль і покращити проникнення активного кисню. Для безпечного досягнення максимального результату доповнюйте кабінетне відбілювання домашніми наборами AlfaClar, які застосовуються через 2-5 днів після процедури. Це допоможе продовжити результат обраного протоколу до 12 місяців.

Безпечно та ефективно

Розроблені для стабільної клінічної роботи, продукти AlfaClar допомагають досягати ефективного відбілювання без абразивів і шкідливих компонентів. Збалансовані формули допомагають зменшити чутливість, підтримати міцність емалі та забезпечити комфорт пацієнта з урахуванням турботи про довкілля.

ПРОТОКОЛИ ВІДБІЛЮВАННЯ

Для активації гелів використовуйте лампи для відбілювання
Lumirix або **Magic Light Pro**.

Сумісні з іншими професійними лампами для відбілювання.

Підготовка емалі (опційно) - 1 хвилина з гелем PreClar Duo™.

Для більш рівномірного й передбачуваного результату відбілювання та зменшення початкового піку чутливості.

Протокол Medium - базовий протокол для цього гелю.

- 3 аплікації по 20 хвилин із гелем Medium.

Три аплікації загальною тривалістю 60 хвилин.

УВАГА: цей протокол може підвищити ризик чутливості зубів.

Протокол Gentle

Комфорт та оптимальні результати.

- 3 аплікації по 20 хвилин із гелем Delicate.

Три аплікації загальною тривалістю 60 хвилин.

Протокол Balanced

Баланс між вражаючим результатом та чутливістю зубів.

- 1-ша аплікація: 20 хвилин із гелем Delicate.
- 2-га аплікація: 20 хвилин із гелем Medium.
- 3-тя аплікація: 15 хвилин із гелем Strong.

Три аплікації загальною тривалістю 55 хвилин.

Протокол Maximum

Максимальні результати без жодних компромісів.

- 1-ша аплікація: 20 хвилин із гелем Delicate.
- 3 аплікації: по 15 хвилин із гелем Strong.

Чотири аплікації загальною тривалістю 65 хвилин.

УВАГА: цей протокол може підвищити ризик чутливості зубів.

Інструкція змішування відповідно до вимог ЄС:

- Видавіть однакову кількість відбілюючого гелю та Forte Minerals на аркуш для змішування у співвідношенні 1:1.
- Ретельно змішайте до повністю однорідної консистенції.

ВАЖЛИВО: після початку змішування концентрація 25% Перекису Водню починає знижуватися. Приблизно через 5 хвилин фінальна концентрація становить 5% Перекису Водню та відповідає вимогам ЄС щодо професійного використання.

ПРОЦЕДУРА ВІДБІЛЮВАННЯ

Початок процедури:

1. Розмістіть пацієнта в кріслі, надягніть нагрудник та захисні окуляри.
2. Зволожите губи вітаміном Е. Тримайте аплікатор позначками догори, надломіть його та дайте рідині перетекти до іншого кінця.
3. Встановіть еластичний ретрактор у рот пацієнта.
4. Зробіть фото до відбілювання, щоб зафіксувати початковий відтінок.
5. Проведіть механічну чистку зубів, щоб видалити наліт або залишки забруднень, які можуть перешкоджати процесу відбілювання.
6. Ізолюйте ясна та ретельно висушіть зуби.

Підготовка емалі - опційно:

1. Нанесіть тонкий рівномірний шар гелю PreClar Duo™ приблизно 0,2 мл на кожну щелепу на всі видимі поверхні зубів, особливо в пришийкових та міжзубних ділянках за допомогою браша або мікроаплікатора.
2. Залиште гель на зубах на 60 секунд. Не використовуйте лампу.
3. Змийте гель та ретельно висушіть зуби.

Нанесення відбілюючого гелю:

1. Візьміть шприц з відбілюючим гелем та приєднайте насадку-аплікатор. Для двохкомпонентного шприца: замість ковпачка встановіть насадку-змішувач, сумістивши тонкий і широкий отвори шприца з відповідними каналами насадки, і поверніть до фіксації. При натисканні на поршень гель та активатор змішуються всередині насадки.
2. Нанесіть тонкий рівномірний шар гелю приблизно 0,15 мл на кожну щелепу. Надто товстий шар може знизити ефективність відбілювання.
3. За допомогою браша або мікроаплікатора рівномірно розподіліть гель по всіх видимих поверхнях зубів.
4. Розмістіть лампу для відбілювання максимально близько до губ/зубів, не торкаючись їх, і активуйте на 15-20 хвилин.
5. Після кожної аплікації змийте гель, висушіть зуби та нанесіть гель повторно, якщо протокол передбачає додаткові аплікації.

Завершення процедури:

1. Після ретельного змивання гелю та висушування зубів зробіть фото, щоб зафіксувати результат відбілювання.
2. Видаліть захист ясен.
3. Зволожите губи та ясна пацієнта тампоном з вітаміном Е.
4. Для зменшення чутливості та підтримки ремінералізації нанесіть тонкий рівномірний шар гелю Forte Minerals приблизно 0,2 мл на кожну щелепу та залиште на 30 хвилин. Не використовуйте лампу.
5. Видаліть гель Forte Minerals. Не полощіть рот пацієнта.

Розширений протокол: для отримання найкращих та ще більш тривалих результатів (до 12 місяців) рекомендуємо використовувати домашнє відбілювання AlfaClar через 2-5 днів після кабінетного.

ПІСЛЯПРОЦЕДУРНИЙ ДОГЛЯД

Щоб максимально зберегти та продовжити результат відбілювання, протягом щонайменше 3-х днів після процедури потрібно дотримуватися «білої дієти» уникаючи їжі, напоїв і косметичних засобів, які можуть забарвлювати зуби:

- продуктів, що містять штучні або натуральні барвники (кава, чай, шоколад та напої на основі какао; темні соки, вино, кольорові лимонади; буряк, чорниця та інші фрукти й овочі з вираженим пігментом; темні соуси, інтенсивні спеції; смузі, газовані та кислотні напої; інше);
- куріння;
- надто гарячої або холодної їжі та напоїв;
- помади або блиску для губ;
- кольорових зубних паст і ополіскувачів.

Дотримання «білої дієти» протягом 2-х тижнів після процедури допоможуть підтримати результат відбілювання та знизити ризик повторного забарвлення зубів.

ВАЖЛИВО ПАМ'ЯТАТИ: якщо ви вжили їжу або напої, які можуть забарвити емаль, використайте Splend Foam якомога швидше, щоб допомогти зберегти результат відбілювання.

ВАЖЛИВО ЗАЗНАЧИТИ: вініри, пломби, коронки та інші реставрації мають іншу структуру, ніж природна емаль, і зазвичай не реагують на відбілювання. У деяких випадках старі реставрації можуть виглядати трохи світлішими після відбілювання, за рахунок видалення пігменту, що накопичується у поверхневих мікропорах. Однак сам реставраційний матеріал не освітлюється.

ПРОТИПОКАЗАННЯ

- **Особам віком до 18 років** - пульпа зуба ще перебуває в процесі розвитку, що може підвищувати ризик чутливості.
- **Пацієнтам з нереалістичними очікуваннями** - відбілювання видаляє пігментацію та освітлює природний колір зубів, але не може змінити генетично зумовлений відтінок емалі.
- **Пацієнтам з активними стоматологічними патологіями** - зокрема карієсом, оголеним дентином, захворюваннями ясен або інфекціями порожнини рота.
- **Пацієнтам з наявними проблемами зубів** - такими як виражена чутливість, тріщини, ерозія емалі або оголені пришийкові ділянки.
- **Пацієнтам з GERX або підвищеною кислотністю у порожнині рота** - ослаблена емаль може підвищувати ризик чутливості під час відбілювання.
- **Пацієнтам зі значною втратою емалі** - внаслідок абразії або ерозії.
- **Пацієнтам з нещодавніми реставраціями або бондингом** - відбілювання може впливати на якість роботи або адгезію бондингових матеріалів.
- **Вагітним або жінкам, які годують груддю** - відбілювання відкладається як запобіжний захід.

FORTE MINERALS

Ремінералізаційна терапія

Коли застосовувати:

- Для максимального ремінералізаційного ефекту - нанесіть Forte Minerals наступного дня після процедури відбілювання. На цьому етапі залишкова окислювальна активність усередині зуба вже знижується, що дозволяє мінералам ефективніше інтегруватися в емаль.
- Для оптимального зниження чутливості - нанесіть Forte Minerals одразу після процедури відбілювання, щоб допомогти зменшити чутливість і підтримати відновлення мінерального балансу емалі.

Спосіб застосування:

1. Нанесіть тонкий рівномірний шар гелю Forte Minerals приблизно 0,2 мл на кожну щелепу та залиште на 30 хвилин. Не використовуйте лампу.
2. Видаліть гель Forte Minerals. Не полощіть рот пацієнта.
3. Проінструктуйте пацієнта утриматися від їжі та напоїв протягом 2-х годин після процедури.

Гідроксиапатит (НАр)

Природний мінерал, близький до мінеральної структури емалі, який допомагає поповнювати втрачені мінерали в ослаблених ділянках емалі та підтримувати її захисний шар.

Кальцій (Са) і магній (Mg)

Ці важливі мінерали працюють синергійно, допомагаючи підтримувати міцність і мінеральний баланс емалі:

- Кальцій - зміцнює ослаблені ділянки емалі та підтримувати її стійкість до ерозії.
- Магній - підтримує мінеральний баланс емалі та відіграє важливу роль у здоров'ї зубів і кісткової тканини.

Цитрат калію (РС)

Компонент для зменшення чутливості зубів. Іони калію знижують збудливість нервових закінчень у дентинно-пульпарному комплексі, сприяючи зменшенню дискомфорту.

Аскорбінова кислота (АА)

Нейтралізує залишковий перекис водню, що сприяє зниженню ризику надмірної чутливості зубів. При змішуванні з відбілюючими гелями допомагає забезпечити поступове та контрольоване розщеплення перекису.

СКЛАД

Гель Medium. Двокомпонентний шприц із Перекисом Водню 25%:

Відбілюючий гель: Hydrogen Peroxide, Glycerin, Aqua, Propylene Glycol, Potassium Citrate, Carbomer, Carboxymethylcellulose, Polyvinylpyrrolidone, Sodium Hydroxide, Sodium Ascorbate, Menthol.

Активатор: Aqua, Glycerin, Propylene Glycol, Carbomer, Sodium Hydroxide, Iron Gluconate, C142053.

Ремінералізаційний гель Forte Minerals: Glycerin, Aqua, Propanediol, Hydroxyapatite, Potassium Citrate, Carbomer, Polyvinylpyrrolidone, Poloxamer 407, Magnesium Chloride, Calcium Glycerophosphate, Ascorbic Acid, Potassium Sorbate, Menthol, C177891.

Тампон з вітаміном E: Tocopherol, Glycerin.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати в сухому прохолодному місці, захищеному від прямих сонячних променів. Зберігати при температурі 4-10°C. Не заморожувати. Зберігати шприци щільно закритими та в недоступному для дітей місці.

ДИСКЛЕЙМЕР

Продукти для відбілювання зубів повинні використовуватися лише спеціалістами і професіоналами з відбілювання зубів або під їхнім безпосереднім наглядом. Відбілювання зубів може освітлити зуби лише до їхнього природного базового відтінку; воно не може змінити природно зумовлений колір емалі. Водночас процедура ефективно допомагає видалити більшість пігментацій і повернути усмішці природну яскравість. Зберігайте всі продукти в недоступному для дітей місці. Уникайте контакту гелів з очима або шкірою. У разі контакту негайно видаліть матеріал і ретельно промийте ділянку водою. Продукти, що містять або вивільняють перекис водню, повинні використовуватися строго відповідно до інструкції та лише кваліфікованим стоматологічним персоналом. Гелі AlfaClar призначені виключно для відбілювання зубів. Гель Forte Minerals призначений лише для місцевого стоматологічного застосування. Не ковтати. Лампи Lumiryx™, MagicLight Pro, MagicLight Mini призначені виключно для процедур відбілювання зубів і не повинні використовуватися з будь-якою іншою метою. Усі шприци та туби призначені для одноразового використання та не підлягають повторному використанню. Результати відбілювання можуть відрізнятися залежно від індивідуальних особливостей пацієнта. Залежно від стану емалі, способу життя, типу та глибини пігментації, покращення може становити від 1 до 10 відтінків за шкалою відбілювання. У деяких випадках можливе покращення лише на один відтінок. Результат може зберігатися від 1 тижня до 12 місяців. Зображення продуктів і кольори гелів наведені лише з ілюстративною метою та можуть відрізнятися від фінального продукту за насиченістю або відтінком. AlfaClar Inc. може оновлювати характеристики продуктів і пакування відповідно до процесу постійного вдосконалення та регуляторних вимог. AlfaClar Inc. та офіційний представник не несе відповідальності за небажані ефекти або зниження ефективності, спричинені неправильним використанням, відхиленням від рекомендованого протоколу або несумісністю з іншими продуктами чи процедурами. Жодна інформація в цьому документі не повинна тлумачитися як медична рекомендація або гарантія конкретного результату. За умови використання згідно з інструкцією ці продукти відповідають чинним вимогам ЄС щодо безпеки косметичних продуктів. Стоматологічні фахівці несуть відповідальність за правильний відбір пацієнтів і безпечне застосування продуктів відповідно до місцевих регуляторних вимог.