

OxyMatrix™ Technology



Conditioning Gel

PRECLAR DUO

AlfaClar

Інструкція

AlfaClar™

Платформа естетичної стоматології

AlfaClar - американська компанія, що пропонує високоякісні продукти та сучасні технології для професіоналів, від безпечних та ефективних систем відбілювання до рішень у сфері естетичної стоматології та догляду за порожниною рота.

Комплексна система відбілювання зубів AlfaClar включає гель **PreClar Duo™**, гель **Delicate** (на основі 44% пероксиду карбаміду), гелі **Medium** та **Strong** (на основі перекису водню 25% і 38%), лампи **Lumiryx™** та **MagicLight Pro**, набори для домашнього відбілювання.

Гель PreClar Duo допомагає підготувати емаль, збалансувати поверхневий pH і підтримати дію активного кисню у відбілюючих гелях.

Технологія OxyMatrix™

Матрична технологія відбілювання зубів із контрольованим вивільненням активного кисню. Вона надає можливість адаптації процесу до типу емалі, рівня чутливості та бажаного результату. Технологія поєднує професійні відбілюючі та підготовчі гелі з індивідуальними клінічними протоколами й домашнім відбілюванням.

Контрольоване вивільнення кисню

Відбілюючі гелі досягають повної активності після нанесення, тоді як лампа Lumiryx™ прискорює й допомагає контролювати реакцію. Завдяки оптимізованому pH, буферній та каталітичній системам, кисень вивільняється поступово - без агресивного "імпульс-ефекту".

Розширений протокол

Розпочніть процедуру з гелю PreClar Duo™, щоб підготувати емаль і покращити проникнення активного кисню. Для безпечного досягнення максимального результату доповнюйте кабінетне відбілювання домашніми наборами AlfaClar, які застосовуються через 2-5 днів після процедури. Це допоможе продовжити результат обраного протоколу до 12 місяців.

Безпечно та ефективно

Розроблені для стабільної клінічної роботи, продукти AlfaClar допомагають досягати ефективного відбілювання без абразивів і шкідливих компонентів. Збалансовані формули допомагають зменшити чутливість, підтримати міцність емалі та забезпечити комфорт пацієнта з урахуванням турботи про довкілля.

ПРОЦЕДУРА

1. Проведіть професійну гігієну або почистіть зуби щіткою із зубною пастою, після чого ізолюйте ясна.
2. Нанесіть тонкий рівномірний шар гелю PreClar Duo (приблизно 0,2 мл на кожну щелепу) на всі видимі сухі поверхні зубів за допомогою браша або мікроаплікатора. Забезпечте повне покриття, особливо в пришийкових та міжзубних ділянках.
3. Залиште гель на зубах на 60 секунд. Не використовуйте лампу на цьому етапі.
4. Повністю змийте гель та ретельно висушіть зуби. Відбілюючий гель необхідно наносити лише на повністю суху поверхню.
5. Продовжуйте процедуру відбілювання.

ПРИМІТКА: Уся поверхня зубів, які підлягають відбілюванню, має бути рівномірно та ретельно покрита гелем PreClar Duo. У першу чергу наносіть гель на зуби з щільнішою емаллю або більш стійкою дисколорацією.

ПРОТИПОКАЗАННЯ

- **Особам віком до 18 років** - пульпа зуба ще перебуває в процесі розвитку, що може підвищувати ризик чутливості.
- **Пацієнтам з нереалістичними очікуваннями** - відбілювання видаляє пігментацію та освітлює природний колір зубів, але не може змінити генетично зумовлений відтінок емалі.
- **Пацієнтам з активними стоматологічними патологіями** - зокрема карієсом, оголеним дентином, захворюваннями ясен або інфекціями порожнини рота.
- **Пацієнтам з наявними проблемами зубів** - такими як виражена чутливість, тріщини, ерозія емалі або оголені пришийкові ділянки.
- **Пацієнтам з GERX або підвищеною кислотністю у порожнині рота** - ослаблена емаль може підвищувати ризик чутливості під час відбілювання.
- **Пацієнтам зі значною втратою емалі** - внаслідок абразії або ерозії.
- **Пацієнтам з нещодавніми реставраціями або бондингом** - відбілювання може впливати на якість роботи або адгезію бондингових матеріалів.
- **Вагітним або жінкам, які годують груддю** - відбілювання відкладається як запобіжний захід.

СКЛАД

Підготовчий гель PreClar Duo: Aqua, Glycerin, Sorbitol, Sodium Phytate, Disodium EDTA, Hydroxyethylcellulose, Xanthan Gum, Citric Acid, Sodium Hydroxide, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Menthol.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати в сухому прохолодному місці, захищеному від прямих сонячних променів. Зберігати при температурі 4-25°C. Не заморожувати. Зберігати шприци щільно закритими та в недоступному для дітей місці.

ДИСКЛЕЙМЕР

Продукти для відбілювання зубів повинні використовуватися лише спеціалістами і професіоналами з відбілювання зубів або під їхнім безпосереднім наглядом. Відбілювання зубів може освітлити зуби лише до їхнього природного базового відтінку; воно не може змінити природно зумовлений колір емалі. Водночас процедура ефективно допомагає видалити більшість пігментацій і повернути усмішці природну яскравість. Зберігайте всі продукти в недоступному для дітей місці. Уникайте контакту гелів з очима або шкірою. У разі контакту негайно видаліть матеріал і ретельно промийте ділянку водою. Продукти, що містять або вивільняють перекис водню, повинні використовуватися строго відповідно до інструкції та лише кваліфікованим стоматологічним персоналом. Гелі AlfaClar призначені виключно для відбілювання зубів. Гель Forte Minerals призначений лише для місцевого стоматологічного застосування. Не ковтати. Лампи Lumiryx™, MagicLight Pro, MagicLight Mini призначені виключно для процедур відбілювання зубів і не повинні використовуватися з будь-якою іншою метою. Усі шприци та туби призначені для одноразового використання та не підлягають повторному використанню. Результати відбілювання можуть відрізнятися залежно від індивідуальних особливостей пацієнта. Залежно від стану емалі, способу життя, типу та глибини пігментації, покращення може становити від 1 до 10 відтінків за шкалою відбілювання. У деяких випадках можливе покращення лише на один відтінок. Результат може зберігатися від 1 тижня до 12 місяців. Зображення продуктів і кольори гелів наведені лише з ілюстративною метою та можуть відрізнятися від фінального продукту за насиченістю або відтінком. AlfaClar Inc. може оновлювати характеристики продуктів і пакування відповідно до процесу постійного вдосконалення та регуляторних вимог. AlfaClar Inc. та офіційний представник не несе відповідальності за небажані ефекти або зниження ефективності, спричинені неправильним використанням, відхиленням від рекомендованого протоколу або несумісністю з іншими продуктами чи процедурами. Жодна інформація в цьому документі не повинна тлумачитися як медична рекомендація або гарантія конкретного результату. За умови використання згідно з інструкцією ці продукти відповідають чинним вимогам ЄС щодо безпеки косметичних продуктів. Стоматологічні фахівці несуть відповідальність за правильний відбір пацієнтів і безпечне застосування продуктів відповідно до місцевих регуляторних вимог.